



* Návod na obsluhu majte prosím vždy po ruke pre budúce použitie


Vloženie batérie

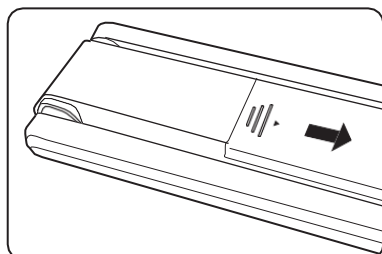

1. Otvorte kryt púzdra batérie na zadnej strane zariadenia

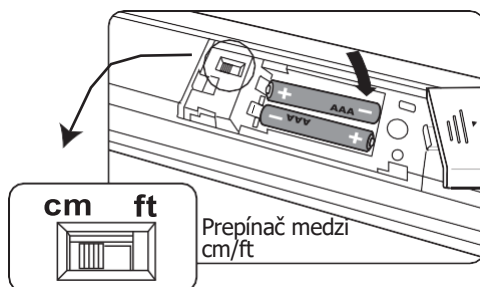



2. Vložte 2x AAA batérie

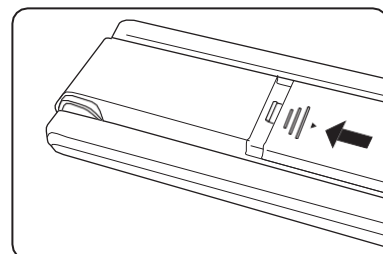







Zatvorte kryt púzdra batérie

Príprava na meranie

Správne použitie

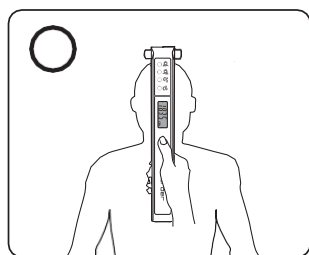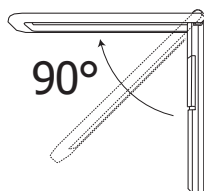


Nesprávne použitie

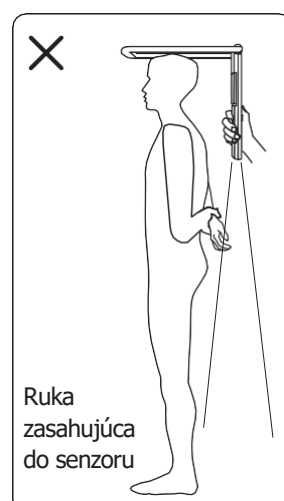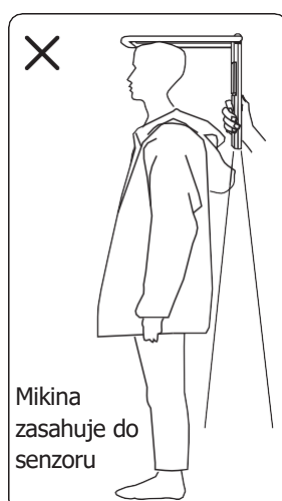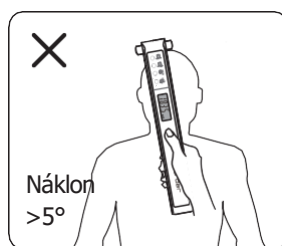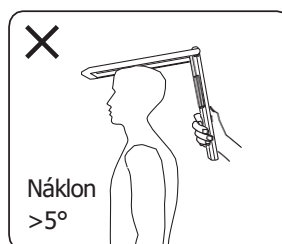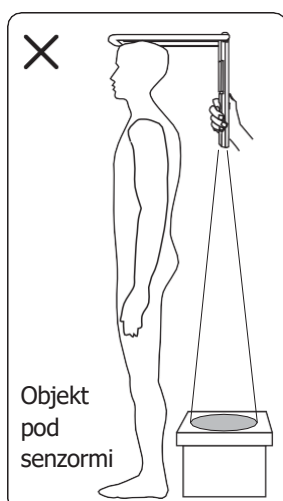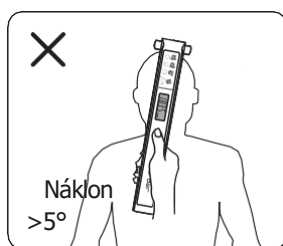


Prevádzkové pokyny

1. stlačte 

zapnite zariadenie

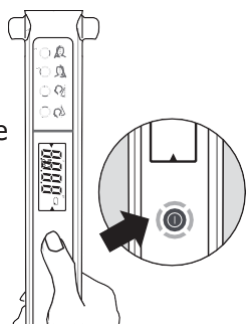

2. Keď sa na obrazovke zobrazí 0,0 cm, , stlačte znova k meraniu výšky

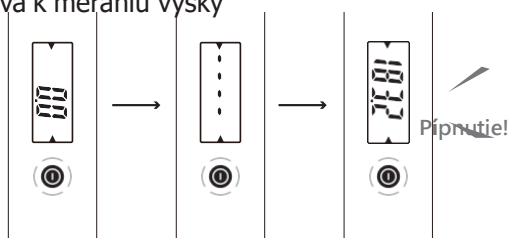

3. Po dokončení merania*, stlačte  vykonajte ďalšie meranie



4. Stlačením a podržaním tlačítka vypnete prístroj. Zariadenie sa automaticky vypne po 20 sekundách, pokiaľ sa nepoužíva

* POZNÁMKA: Pri bezdrôt. modeli budú výsledky prenesené automaticky do prijím. zariadenia.





Špecifikácia

Model		HM250U
Meranie výšky	Merací rozsah	50-250 cm 1'8" - 8'0"
	Delenie stupnice	0,1 cm / 0,1 palcov
	Presnosť	+/- 1 cm
	LCD obrazovka	50 x 20 mm
Rozmery	Zložený	349(Š) x 64 (D) X 23(H) mm
	Rozložený	349 (L) X 315 (D) X 30(H) mm
Hmotnosť prístroja		190 g (bez batérie)
Kľúčové funkcie		On/Off/Measure (meranie)
Prenos dát		Bezdrôtový (voliteľný)
Napájanie		2x AAA batérie
Prevádzková teplota & vlhkosť		5 °C ~ 35 °C
		15 % / 85 % RH
Senzor		Ultrazvukový
Úroveň detekcie		G-senzor
Náklon varovania		>5 °
Automatické vypnutie		20 sekúnd

! UPOZORNENIE



Pokiaľ náklon prekročí 5°, rozsvieti sa oranžové výstražné svetlo takže v meraní nemožno pokračovať. Prosím, upravte uhol zariadenia, pokiaľ výstražné svetlá naklonenia nezmiznú a následne vykonajte meranie.

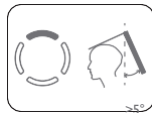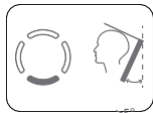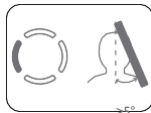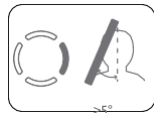

Chybové správy



Výška
presahuje 250
cm / 8'

Výška pod
50 cm / 1,8"

Slabá batéria

Všeobecné informácie

Ďakujeme, že ste si vybrali toto zariadenie od Charder Medical. Prístroj je navrhnutý tak, aby bol užívateľsky jednoduchý. V prípade, že narazíte na problémy, ktoré nie sú popísané v tomto návode, kontaktujte vášho miestneho servisného partnera.

Všeobecné zaobchádzanie

Pre presné meranie vyžaduje aby chodidlá, chrbát a hlava subjektu bola vyrovnaná.

Bezpečnostné pokyny

- Batérie by mali byť uchovávané mimo dosahu detí. Pri užití, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Predpokladaná životnosť: 5 rokov
- Dodržiňte prípustné okolité teploty pre použitie

Environmentálne pokyny & čistenie

- Všetky batérie obsahujú toxické zlúčeniny. Batérie by mali byť likvidované prostredníctvom určených príslušných organizácií. Batérie by sa nemali spaľovať.
- Povrch zariadenia by mal byť čistený pomocou obrúska na báze alkoholu.

Záruka/zodpovednosť

- Záručná doba je osemnásť (18) mesiacov, začínajúc dátumom nákupu. Uchovajte si faktúru ako doklad o zaplatení.
- Nenesieme žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené kvôli niektorému z nasledujúcich dôvodov: nevhodné alebo nesprávne skladovanie, používanie, úpravy, prirodzené opotrebovanie alebo pád na podlahu.
- Toto zariadenie neobsahuje žiadne užívateľom udržiavané časti. Všetku údržbu, technickú prehliadku a opravy by mal prevádzkať autorizovaný servisný partner Charder s použitím originálneho príslušenstva a náhradných dielov Charder.

Likvidácia

- S týmto výrobkom nesmie byť zaobchádzané ako s bežným komunálnym odpadom, ale je potrebné ho odovzdať na určené zberné miesta pre elektroniku. Ďalšie informácie by mali poskytnúť miestne úrady pre likvidáciu odpadu.

Vyrobené:

Charder Elektronický spol. Ltd.

č. 103, Guozhong Rd., Dali Dist.,
Taichung City, 41262 Tchaj-wan (R.O.C)