


MARSDEN

UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL **HM-201M** výškomer

Pred tým ako začnete produkt používať, prečítajte si inštrukcie v tomto manuáli.

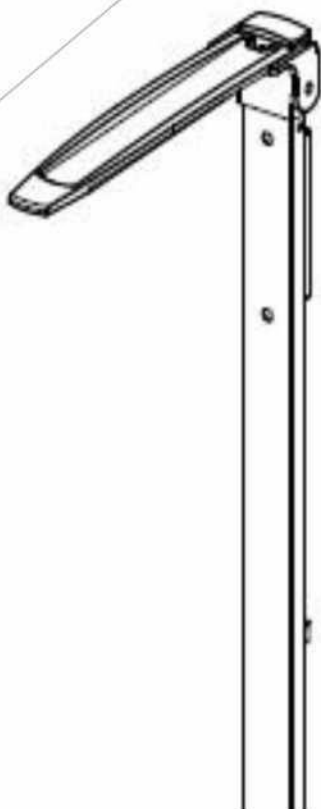

Versi on TI. 03/18

Obsah

Špecifikácia produktu.....	3
Bezpečnostné inštrukcie.....	3
Záruka	4
Čistenie.....	4
Likvidácia produktu	4
Návod k zostaveniu: S držiakom.....	5
Návod k zostaveniu: Bez držiaku	5
Prevádzka.....	6
Informácie o výrobcovi a servis.....	7

Ďakujeme vám, že ste si zakúpili profesionálny zdravotnícky produkt Marsden. Ide o presný výškomer a jeho šetrným používaním budú zabezpečené dlhoročné presné merania.

Špecifikácia produktu

Model	HM-201M
Trieda presnosti	V súlade s 2007/47/EC: Trieda I s meracou funkciou
Merací rozsah	60cm - 210cm
Delenie	1mm
Presnosť	± 10mm
Rozmery	(Š)55mm x (V)784mm x (H)34mm
Váha	približne 700g
Teplotný rozsah	10 - 40°C
Záruka	2 roky

Bezpečnostné inštrukcie

Pred uvedením výrobku do prevádzky si prosím pozorne prečítajte informácie uvedené v tomto návode, ktorý obsahuje dôležité pokyny pre správnu inštaláciu a používanie prístroja.

- Dodržujte vždy pokyny pre montáž a prevádzku uvedené v tomto návode.
- Pokiaľ pripojujete merací stĺpec, použite len merací stĺpec Marsden.
- Použite dodaný montážny materiál.
- Aby sa zabránilo nebezpečiu zranenia, tak vždy po meraní sklopte meriacu posuvnú zárazku.

Spoločnosť Marsden / výrobca nezodpovedá za škody vzniknuté nedodržaním nasledujúcich pokynov:

- Nevhodná inštalácia / použitie bude mať za následok neplatnosť záruky.
- Tento výrobok je určený pre použitie v krytých priestoroch.
- Dodržujte povolené teploty okolia.

Pokiaľ máte nejaké problémy, obráťte sa na spoločnosť Marsden / alebo svojho miestneho

predajcu / servisného partnera.

Záruka

- Na závady spôsobené nesprávnym materiálom alebo nesprávnym výrobným spracovaním sa vzťahuje dvojročná záruka od dátumu dodania.
- Všetky pohyblivé časti - batérie, káble, sieťové zdroje, akumulátory atď. - sú zo záruky vylúčené.
- Závady, na ktoré sa vzťahuje záruka, budú zákazníkovi bezplatne vymenené / opravené. Žiadnym ďalším nárokom nemôže byť vyhovené. Pokiaľ bude zariadenie umiestnené inde než v priestoroch zákazníka, bude niešť zákazník náklady na dopravu obojsmerne.
- V prípade poškodenia pri preprave je možné reklamáciu uplatniť len v prípade, že bol pre prepravu použitý kompletný originálny obal a výškomer bol v tomto obale zaistený a pripevnený. Preto by mali byť všetky obaly zachovávané.

Záruka bude neplatná, pokiaľ tento výrobok bude rozoberaný neoprávneným personálom.




Čistenie

- Meráciu tyč čistite pomocou čisticiaho prostriedku pre domácnosť alebo pomocou dezinfekčného prostriedku.
- K čisteniu nepoužívajte korozívne kvapaliny, veľké množstvo vody alebo vysokotlakové umývacie zariadenia.

Likvidácia produktu




- Podrobnosti o likvidácii produktu vám poskytne miestna spoločnosť zaoberajúca sa likvidáciou odpadu alebo spoločnosť, kde ste výrobok zakúpili.

Návod na zostavenie: S držiakom

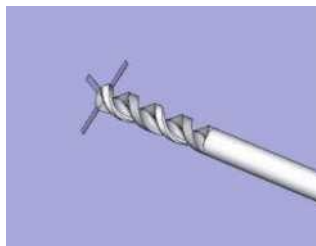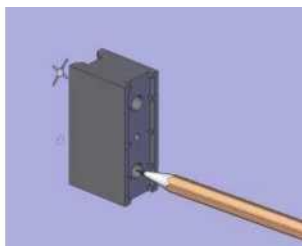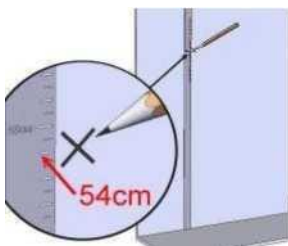

54 cm nad zemou vyznačte na stenu krížik. Priložte držiak, zarovnajte horný otvor s vyznačeným krížikom a pomocou spodného otvoru vyznačte druhý krížik. V mieste oboch značiek vyvrtajte do steny diery.




Do vyvrtaných dier zasunúte hmoždinky a držiak prišrobujte ku stene. K držiaku

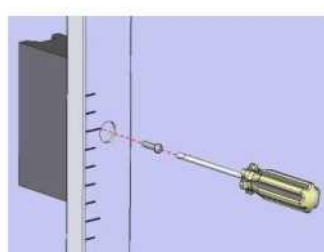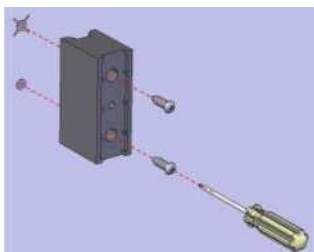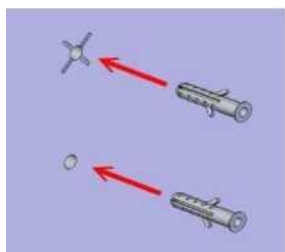


prišrobujte tyč výškomeru.

Návod na zostavenie: Bez držiaku

51,5 cm od zeme vyznačte na stene krížik. Predĺžte tyč výškomeru, pomocou horného

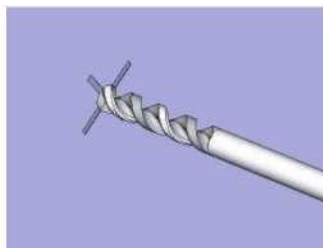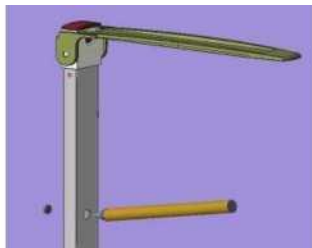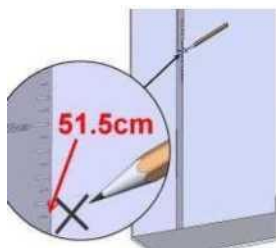

otvoru vyznačte druhý krížik a v mieste oboch značiek vyvrtajte do steny diery.

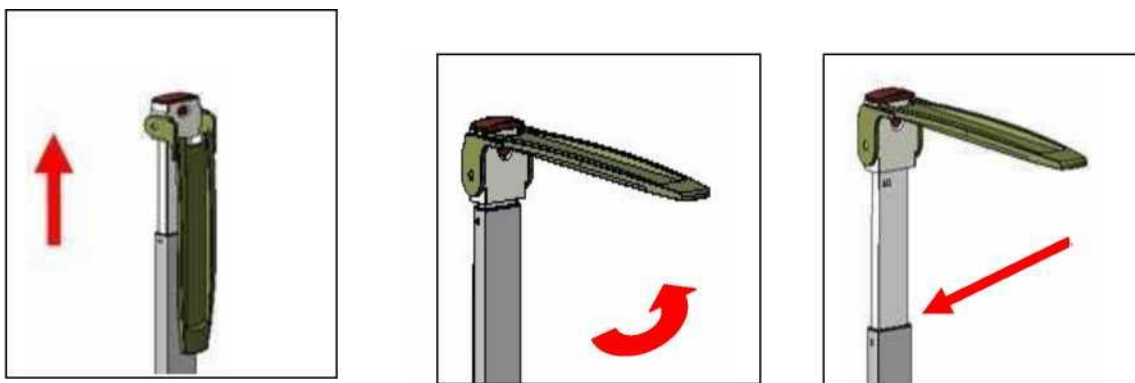


A

Vytiahnite tyč. Umiestnite zarážku do vodorovnej polohy. Výšku odrátajte tak, ako je zobrazené na obrázku (A).

Meranie pod 120cm:

B

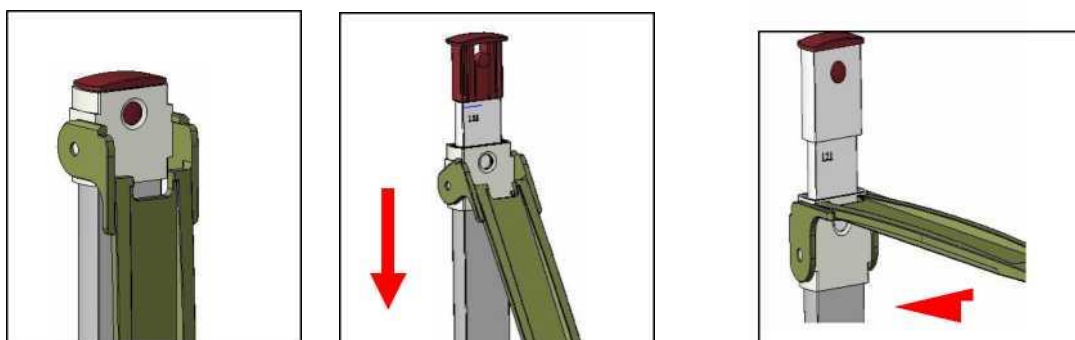

Sklopte zarážku dole a stlačte a podržte tlačítko stisknuté. So stisknutým tlačítkom stiahnite hlavu zarážky. Výšku odrátajte tak, ako je zobrazené na obrázku (B).

Informácie o výrobcovi a servis

Tel: 01709 364296/0800 169 2775

Fax: 01709 364293

E-mail: sales@marsdengroup.co.uk

Výroba a distribúcia:

Unit 7, Centurion Business Park,

Coggin Mill Way,

Rotherham,

S60 1FB

www.marsden-weighing.co.uk

IN-1409 [16089B] REV 11/2016

SK - záručný a pozáručný servis zabezpečuje spoločnosť:

Medicton SK s.r.o.

Tel.: +421 910 989 949

Mobil: +421 910 334 335

e-mail: servis-sk@medicton.sk

web: www.medicton.sk



Accuracy Assured